

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЗЯТИЮ ОБРАЗЦОВ КРОВИ ДЛЯ MGIEasy



Одна пробирка для взятия образцов крови



Один непроницаемый защитный пакет



Один гелевый пакет



Один защитный конверт



Одна коробка для отправки образцов

Гелевые пакеты хранить в холодильнике (t от +2 до +8 °С). Остальное содержимое комплекта хранить при комнатной температуре.

1 Заполните форму заказа и подпишите «Согласие пациента».


Внимательно заполните все поля, подпишите и поставьте печать. Предоставьте пациентке форму «Согласие пациента» для ознакомления и подписания. Сложите в коробку для транспортировки заполненные документы. Транспортируйте заполненные пробирки при t от +6 до +37°C.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ замораживать заполненные пробирки
ЗАПРЕЩАЕТСЯ замораживать гелевый пакет (только охлаждение!)


2 Проверьте срок годности пробирки и проведите взятие образцов

Произведите взятие образцов венозной крови вакуумным методом непосредственно в пробирку (использовать только пробирки из комплекта). Рекомендуется использовать прямую иглу 21 калибра. Заполните пробирку до отметки, как показано на рисунке, извлеките ее из держателя. Запишите дату взятия образцов в форму заказа.

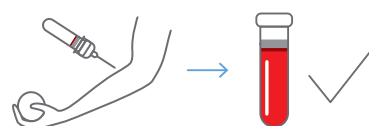


3 Перемешайте пробу крови с антикоагулянт

10 раз переверните пробирку на 180 градусов. Неполное или слишком замедленное перемешивание может привести к невозможности проведения настоящего исследования.

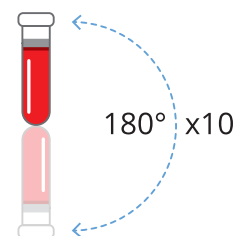


4 Упакуйте пробирки для отправки

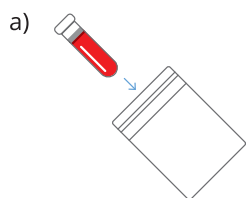


Поместите пробирки в непроницаемый защитный пакет и запечатайте его



Оберните непроницаемый защитный пакет с пробирками гелевым пакетом

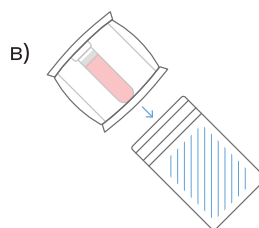

Поместите в защитный конверт конверт и запечатайте его

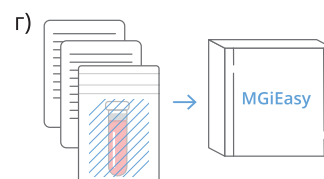

Поместите защитный конверт и заполненные документы в коробку для транспортировки и закройте ее.

Внимание: Форму заказа в защитный конверт НЕ ПОМЕЩАТЬ!

5 Отправьте укомплектованную коробку



Вызов курьера по телефону
+7 800 301 17 51
в день взятия биоматериала

ВНИМАНИЕ!

Невыполнение инструкции по взятию образцов, маркировке и отправке может привести к невозможности проведения настоящего исследования.