

Инструкция по взятию образцов крови для скрининга на носительство генетических заболеваний



Одна пробирка ЭДТА



Один гелевый пакет



Пакет документов




Одна коробка для транспортировки

ВНИМАНИЕ: гелевый пакет хранить в холодильнике при $t +2 - +8^{\circ}\text{C}$ (не замораживать).

1 Заполните форму заказа и подпишите «Согласие пациента»


Внимательно заполните все поля, подпишите. Предоставьте пациенту форму «Согласие пациента» для ознакомления и подписания. Сложите в коробку для транспортировки заполненные документы.

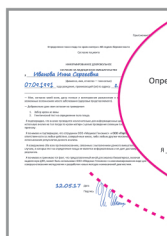Определение пола плода по крови матери с 8-й недели беременности.
Согласие пациента
Согласие на медицинское вмешательство
Иванова Инна Сергеевна
(Фамилия, имя, отчество — полностью)
07.04.1991 (дата рождения, прописавшей (ин) по адресу — Е. А.


2 Проверьте срок годности пробирки Подпишите пробирку

В присутствии пациента подпишите пробирку, указав ФИО, дату рождения, дату и время взятия образцов.

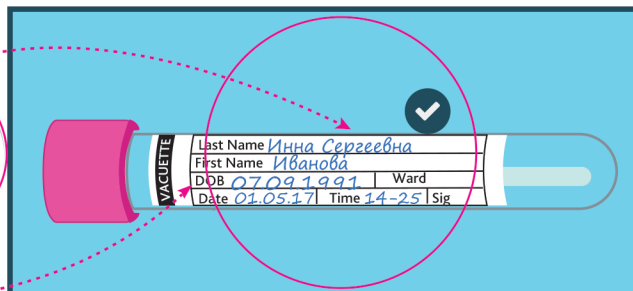


3 Произведите взятие образцов крови

Соберите вакуумную систему для забора крови. Наложите жгут, обработайте кожные покровы, введите иглу в вену, вставьте пробирку крышкой в держатель до упора. Как только кровь начнет поступать в пробирку, снимите жгут. Заполните пробирку до черной отметки, как показано на рисунке, извлеките ее из держателя. От каждого пациента необходимо предоставить на анализ 1 пробирку крови.

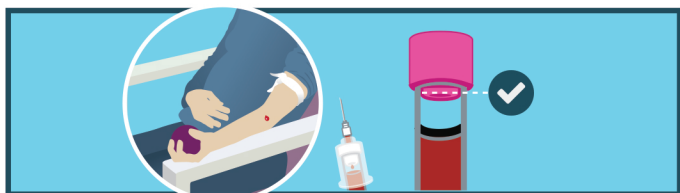


4 Смешайте пробу крови


5-8 раз переверните пробирку на 180 градусов для полного смешивания крови с реагентом.

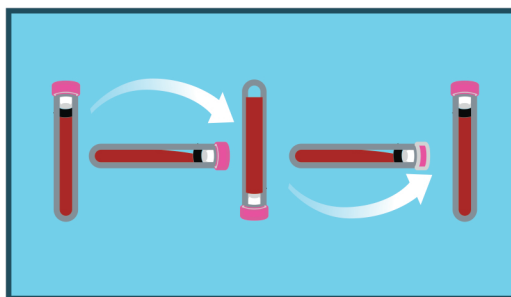

5 Упакуйте пробирку с кровью в коробку

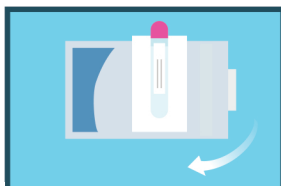

а) Оберните пробирку гелевым пакетом

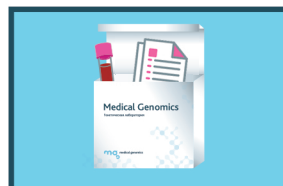

б) Положите в коробку документы: подписанное ИДС и форму заказа

6 Отправьте укомплектованную коробку

Вызов курьера по телефону 8 800 301-17-51 в день взятия биоматериала. Хранение и транспортировка материала производится в срок до 48 часов (при температуре $+2 - +8^{\circ}\text{C}$).